
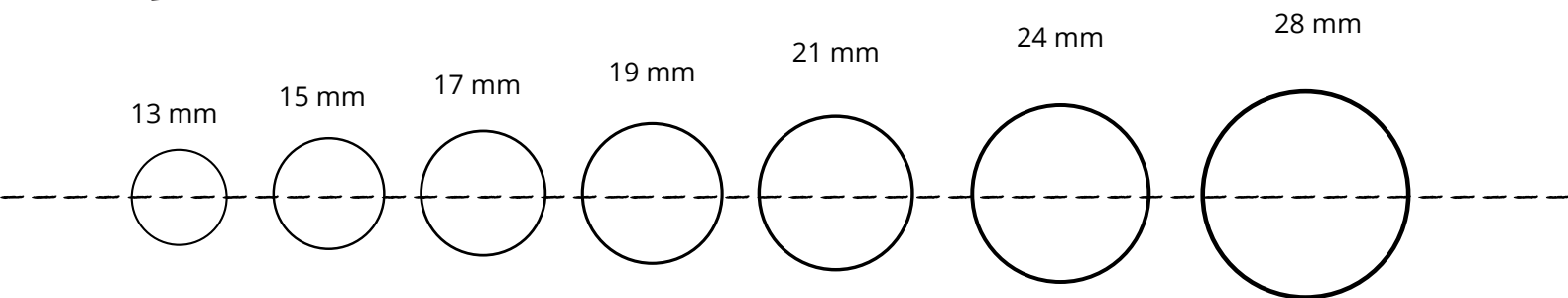
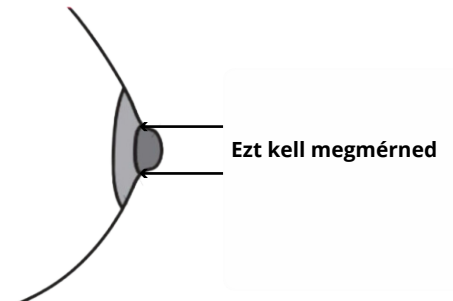


Mellbimbó vonalzó

- 1 Vágd ki a sablon félköröket a szaggatott vonal mentén!
- 2 Illeszd a mellbimbóhoz az egyes méreteket!
- 3 1-2 millimétert számolj rá, hogy a megfelelő tölcsérméretet kapd!

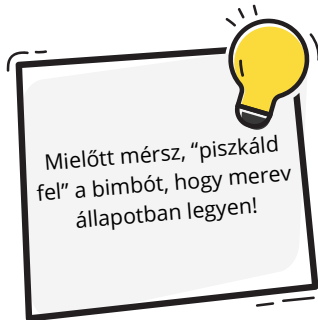

Nyomtasd ki 100% méretarányosan, ne oldal igazítással!

Tölcsérméret check-lista

- ☐ A mellbimbó szabadon mozog a tölcsérben
- ☐ Az areola (bimbóudvar) nem szívódik be a tölcsérbe
- ☐ A fejes nem kényelmetlen és nem fájdalmas.
- ☐ A tölcsér jól zár és érzem, hogy a mellszívó vákumot képez.
- ☐ A tejleadó reflex rendesen működik, a tej áramlása szabad.

